

BRUKSANVISNING HURTIGTEST

Roche SARS-Cov-2 Antigen Self Test Nasal

Utstyr som medfølger:



- Testpinne
- Brikke, ligger i hvit emballasje
- Testglass med væske
- Blank kork til testglass

Video and information in English:

<https://diagnostics.roche.com/global/en/products/params/sars-cov-2-antigen-self-test-nasal.html>


Pakk ut utstyret og legg på rett flate, ta brikke ut av emballasje. Åpne så testpinnen og utfør test.

- 1) Vend pasientens hode litt bakover
- 2) Før testpinnen inn i neseboret, ca 2 cm inn
- 3) Roter testpinnen 4 ganger mot neseveggen i totalt 15 sekunder, utfør dette i begge nesebor
- 4) Sett testpinnen i testglass, klem sammen testglasset i bunnen med pinnen og vri pinnen rundt minst 10 ganger
- 5) Ta ut testpinnen samtidig som du klemmer på sidene av testglasset for å trekke ut væske fra testpinnen
- 6) Sett blank kork på testglass, fest godt
- 7) Forsiktig snu testglass, hold det slik uten bevegelse i minst 30 sekunder
- 8) Drypp forsiktig 4 dråper av innholdet i testglass over på dråpepunkt (rundt felt) på brikken
- 9) Les av resultat etter 15 og før 30 minutter, testresultatet kan være feil hvis det leses av senere

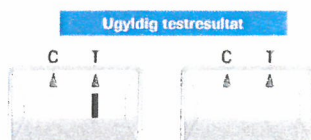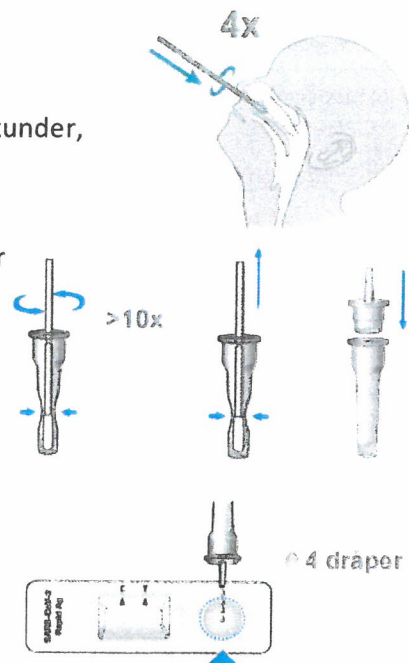


Ugyldig test

Ingen farget linje i kontrollområdet (C). Testen skal i slike tilfeller gjentas med ny prøve og utstyr.

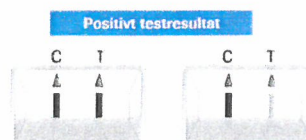

Positiv test

To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyans i testområdet skal vurderes som positiv.

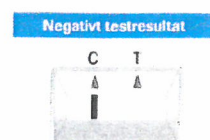

Negativ test

Kun en farget linje i kontrollområdet (C).